


Produkte für die Larynx-Chirurgie

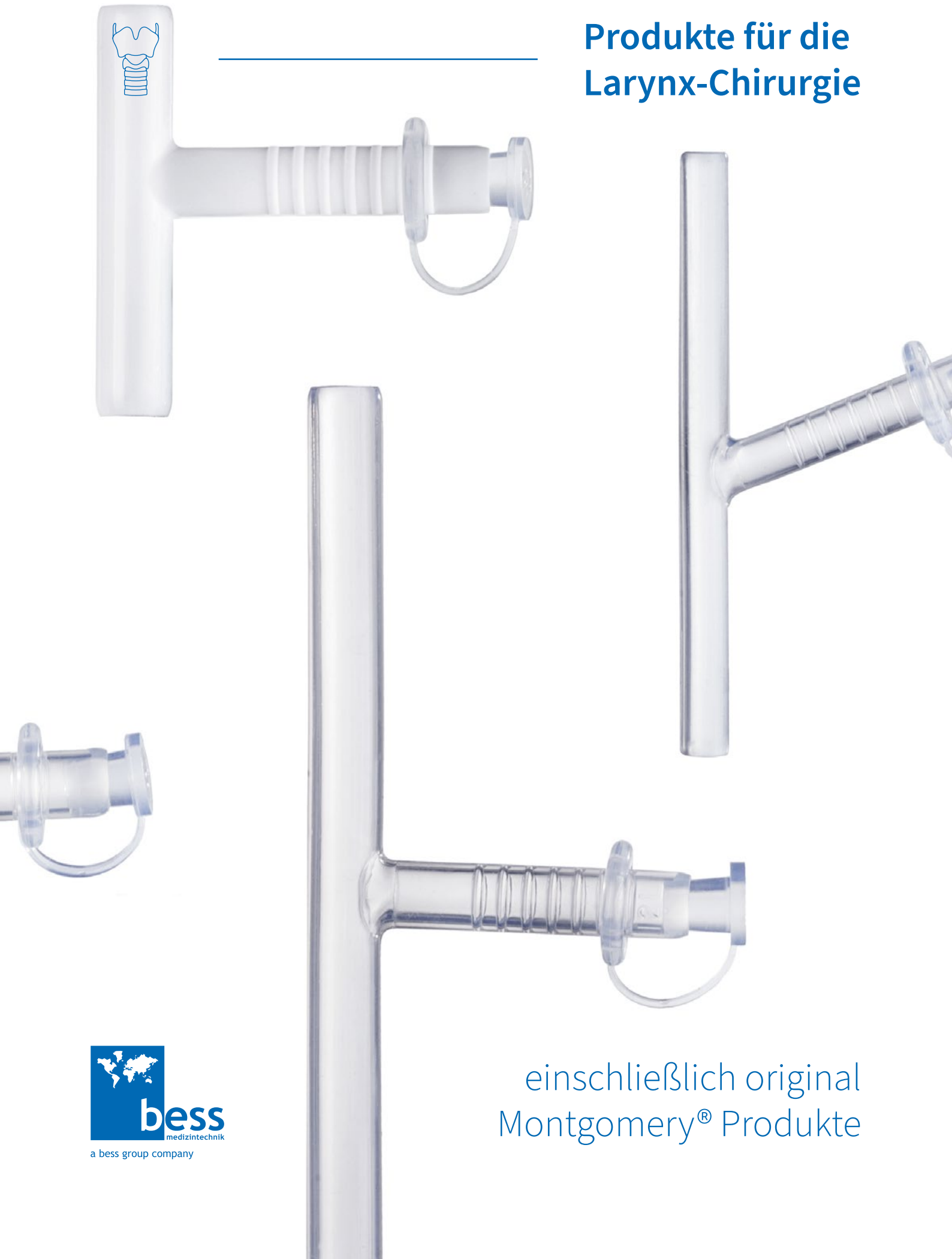

bess medizintechnik

Persönlich. Kompetent. Verlässlich.

Qualität, die überzeugt. Beratung, die keine Fragen offen lässt.

Unser Fokus liegt auf dem Patientenwohl.

Wir bieten Produkte an, die wir uneingeschränkt auch unserer Familie empfehlen würden. Das ist unser Qualitätsanspruch.



Firmensitz Berlin

Ein inhabergeführtes Familienunternehmen.

Von Anfang an.


Als Teil der bess group sind wir eng verbunden mit unseren Schwesterfirmen Leufen Medical (Deutschland), Novatech (Frankreich) und Boston Medical Products (USA).



a bess group company



Wegweisende Lösungen. Von Chirurgen, für Chirurgen.

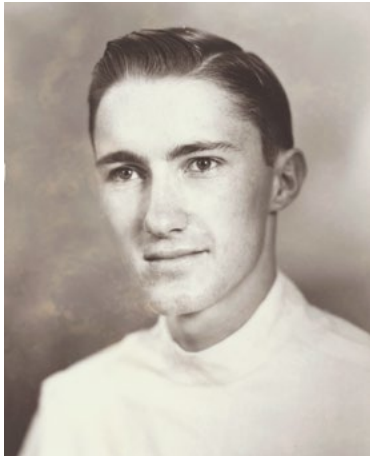

William W. Montgomery, M.D. 1923-2003

Boston Medical Products wurde 1980 von drei Ärzten, darunter der weltbekannte HNO-Chirurg William W. Montgomery, gegründet, um andere Ärzte mit den originalen Innovationen von Dr. Montgomery zu versorgen. Bis heute wird Boston Medical Products von seinem Lebenswerk angetrieben beste Patientenversorgung anzubieten.



Montgomery®
Safe-T-Tube™

Montgomery®
Implantat-System
für die Thyreoplastik



Die original Montgomery®-Marke

Boston Medical Products ist der einzige Hersteller der Welt, der autorisiert ist, Produkte der Marke Montgomery® zu produzieren.

Einfachheit, Benutzerfreundlichkeit für den Arzt und Patientenkomfort sind die Markenzeichen unserer Innovationen, von der Montgomery® Safe-T-Tube™, die ursprünglich 1973 patentiert wurde, bis zum Montgomery® Implantat-System für die Thyreoplastik.




a bess group company

Überzeugende Qualität.

Internationale Vernetzung



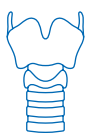

Inhaltsverzeichnis

Montgomery® Implantat-System für die Thyreoplastik.....	6
Das Implantat	8
System-Optionen	10
Montgomery® Safe-T-Tubus™	14
Pädiatrischer Safe-T-Tubus™	18
Standard Safe-T-Tubus™	18
Thorakaler Safe-T-Tubus™	18
Extralanger Safe-T-Tubus™	19
Tapered Safe-T-Tubus™	19
Larynx-Produkte	22
Montgomery® Larynx-Stent	23
Rutter Suprastomaler Stent	24
Montgomery® Larynx-Keel.....	25
LACS — Laryngeal Anterior Comissure Stent	26
Ösophagus-Tuben	28
Montgomery® Speichel-Bypass-Tubus.....	29
Har-El Pharynx Speichel-Bypass-Tubus	30
Trachealkanülen und Sprechventile	31
Montgomery® Langzeitkanüle	31
Moore Trachealkanüle.....	33
Montgomery® Sprechventil	32



Montgomery®


Implantat-System für die Thyreoplastik



Standardisiertes System zur Behandlung der einseitigen Stimmlippenparese, bestehend aus

- speziell entwickelte chirurgische Instrumente
- Sizer zur Messung des Medialisierungsabstands vor dem Einsetzen des Implantats
- eine Auswahl von sechs Implantatgrößen für weibliche Patienten und sechs Größen für männliche Patienten.



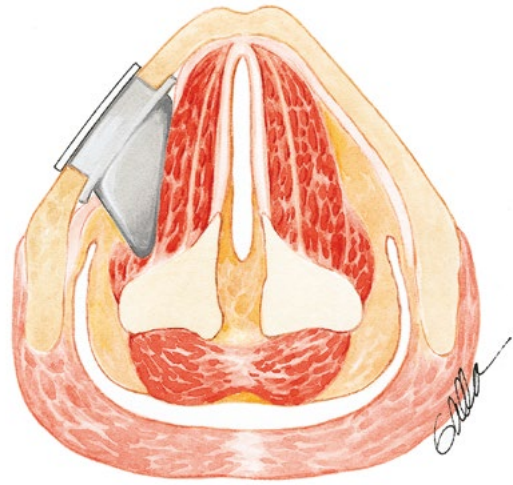

-
- Vollständig standardisiertes System
 - Keine Notwendigkeit, Implantate von Hand anzufertigen
 - Selbsthaltendes Implantatdesign
 - Kein Nähen erforderlich
 - Geringeres Trauma und kürzere Operationszeit
 - Reversibel
 - Bewährter klinischer Erfolg
-

Das Montgomery® Implantat-System für die Thyreoplastik ist das Ergebnis von über einem Jahrzehnt Forschung und Entwicklung. Dieses revolutionäre System wurde für die Behandlung einseitiger Stimm lippenparese entwickelt und ist standardisiert, so dass die zeitaufwändige Anpassung der Implantate zum Zeitpunkt der Operation entfällt.

Standardisierung führt zu konsistenten Ergebnissen. Die solide klinische Erfahrung mit Tausenden von Patienten hat zu einer herausragenden Verbesserung der Stimme geführt und gleichzeitig die mit handgeschnitzten Implantaten und Injektionstechniken verbundenen langen Verfahren und Komplikationen reduziert.



Montgomery® Thyreoplastik-Implantate

Das einzigartige Design des Montgomery® Thyreoplastik-Implantats besteht aus zwei Hauptkomponenten: der rechteckigen Basis und dem dreieckigen Kopf.



Der dreieckige Teil ist aus weichem Silikon gefertigt, um das Stimmband und den Stimmbandfortsatz des Aryknorpels zu medialisieren. Die Hypotenuse des Dreiecks entspricht der Längsachse des Stimmbandes.

Die Höhe des Dreiecks wird in Millimetern gemessen und bestimmt die Implantatgröße: 6, 7, 8, 9, 10 und 11 mm für Frauen und 8, 9, 10, 11, 12 und 13 mm für Männer.


Die Basis besteht aus festem Silikon und ist dreistufig. Die laterale oder äußere Schicht liegt auf der Außenfläche der Schilddrüsenlamina auf und verhindert eine mediale Migration des Implantats. Die mittlere Schicht stabilisiert das Implantat und verhindert eine Rotation. Die innere Schicht ruht an der Innenfläche der Schilddrüsenlamina und verhindert eine Dislokation nach außen. Es gibt eine einheitliche Basis für weibliche und eine einheitliche Basis für männliche Größen.

Auf der Basis eines jeden Implantats sind Größe und Geschlecht angegeben.



Montgomery® Einweg-Sizer für die Thyreoplastik

Spezielle Sizer für weibliche (grün) und männliche (blau) Patienten simulieren präzise die Medialisierung der Stimmbänder, so dass der Einsatz und Austausch mehrerer Implantate entfällt. Dies führt zu einem geringeren Trauma für den Patienten und einer kürzeren Operationszeit. Das Einwegset umfasst fünf Größen, die den fünf kleinsten Implantatgrößen entsprechen, und ist sowohl für Frauen als auch für Männer erhältlich.

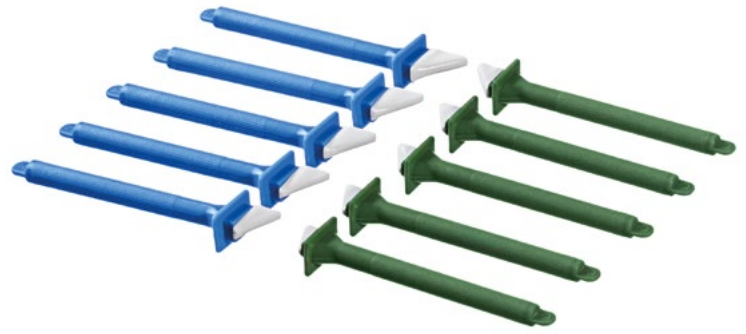

Jeder Sizer enthält eine Markierung mit Implantatgröße und Geschlecht.



Montgomery® Instrumente für die Thyreoplastik

Maßgeschneiderte chirurgische Instrumente erleichtern die Lokalisierung, Gestaltung und Herstellung des Knorpelfensters sowie das Einsetzen des Implantats.

Alle Instrumente sind einzeln oder als komplettes 13-teiliges Set mit Sterilisationstray erhältlich.

Das chirurgische Verfahren

Das chirurgische Verfahren wurde fein abgestimmt und umfasst einen schrittweisen Prozess zur Lokalisierung des Thyreoplastik-Fensters, zur Herstellung des Fensters, zur Bestimmung der Implantatgröße und zum Einsetzen des Implantats. Das Verfahren verkürzt die Operationszeit und ist vollständig reversibel. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie in der Gebrauchsanweisung.



Montgomery® Thyreoplastik-Implantate

REF		REF	
BMP MTF-06	Frauen-Größe 6	BMP MTM-08	Männer-Größe 8
BMP MTF-07	Frauen-Größe 7	BMP MTM-09	Männer-Größe 9
BMP MTF-08	Frauen-Größe 8	BMP MTM-10	Männer-Größe 10
BMP MTF-09	Frauen-Größe 9	BMP MTM-11	Männer-Größe 11
BMP MTF-10	Frauen-Größe 10	BMP MTM-12	Männer-Größe 12
BMP MTF-11	Frauen-Größe 11	BMP MTM-13	Männer-Größe 13

Wird steril geliefert. Ein Implantat pro Packung.



Implantat-Sets enthalten je 16 Implantate

Deutliche Einsparungen gegenüber dem Kauf einzelner Implantate


REF	
BMP MTC-01	<i>Set-Kombination mit Implantaten für Männer und Frauen, enthält 16 Implantate:</i> Frauen-Größen: 6, 7, 8, 11 zu je 1 Stk. / 9, 10 zu je 2 Stk. Männer-Größen: 8, 9, 10, 13 zu je 1 Stk. / 11, 12 zu je 2 Stk.
BMP MTF-01	<i>Implantat-Set für Frauen, enthält 16 Implantate:</i> Größen 6, 11 zu je 2 Stk. / Größen 7, 8, 9, 10 zu je 3 Stk.
BMP MTM-01	<i>Implantat-Set für Männer, enthält 16 Implantate:</i> Größen 8, 13 zu je 2 Stk. / Größen 9, 10, 11, 12 zu je 3 Stk.




Montgomery® Thyreoplastik Sizer-Sets

REF	
BMP MT-300	Sizer-Set für Frauen (5 Einweg-Sizer)
BMP MT-400	Sizer-Set für Männer (5 Einweg-Sizer)

Wird steril geliefert, Einmalgebrauch. Die Kits enthalten einen Sizer jeder Größe (5 Größen pro Kit).

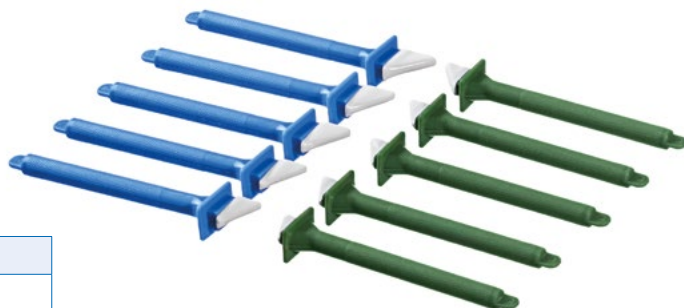

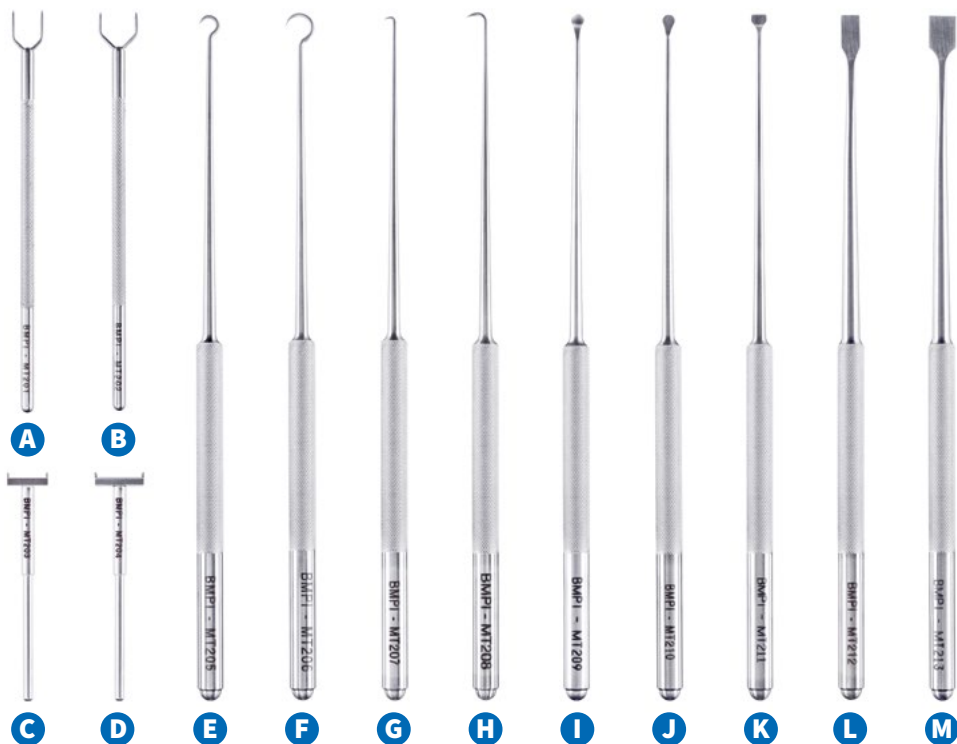

Montgomery® Instrumente für die Thyreoplastik

REF	Beschreibung
A	BMP MT-201 Fensterlehre, 7 mm, weiblich
B	BMP MT-202 Fensterlehre, 9 mm, männlich
C	BMP MT-203 Fensterschablone, weiblich
D	BMP MT-204 Fensterschablone, männlich
E	BMP MT-205 Gebogener Haken, klein
F	BMP MT-206 Gebogener Haken, groß
G	BMP MT-207 Scharfer Haken, klein

REF	Beschreibung
H	BMP MT-208 Scharfer Haken, groß
I	BMP MT-209 Entenschnabel-Elevatorium, 3 mm
J	BMP MT-210 Entenschnabel-Elevatorium, 5 mm
K	BMP MT-211 Coupland-Elevatorium
L	BMP MT-212 Implantat-Einführinstrument, weiblich
M	BMP MT-213 Implantat-Einführinstrument, männlich

Wird unsteril geliefert. Ein Instrument pro Packung.

Komplettes 13-teiliges Instrumenten-Set mit Sterilisationstray

Einzelne Instrumente sind separat erhältlich.

REF	
BMP MT-200	Instrumentenset, im Sterilisationstray, bestehend aus 13 Instrumenten

Wird unsteril geliefert.



Multiple Procedure Thyroplasty Kit

Konzipiert für Chirurgen oder Einrichtungen, die jährlich mehrere thyreoplastische Eingriffe durchführen.



REF	Beschreibung	VE
BMP MT-MP	Multiple Procedure Kit, enthält: <ul style="list-style-type: none">• 16 Implantate (je 8 für Frauen und Männer)• 8 Sizer-Sets (je 4 für Frauen und Männer)• 1 Instrumentenset, groß, im Sterilisationstray	1 Kit



Kleine Instrumentensets

Bestehen jeweils aus 3 Instrumenten für Frauen oder Männer.

Instrumentenset, klein, für Frauen



Fensterlehre, 7 mm, weiblich



Fensterschablone, weiblich



Implantat-Einführinstrument, weiblich

Instrumentenset, klein, für Männer



Fensterlehre, 9 mm, männlich



Fensterschablone, männlich




Implantat-Einführinstrument, männlich

REF	Beschreibung	VE
BMP MT-SIF	Instrumentenset, klein, für Frauen, bestehend aus 3 Instrumenten	1 Set
BMP MT-SIM	Instrumentenset, klein, für Männer, bestehend aus 3 Instrumenten	





**Der
Montgomery[®]
Safe-T-Tubus[™]**

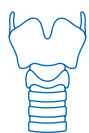



Zweckbestimmung

Der Montgomery® Safe-T-Tubus™ dient zur Aufrechterhaltung eines adäquaten trachealen Atemwegs und zur Stützung der rekonstruierten/wiederhergestellten stenotischen Trachea.

Indikationen

- Akute laryngotracheale Verletzungen
- Schienung einer rekonstituierten Trachea
- Schienung einer rekonstruierten Trachea
- Stenosen der Trachea, wenn die zervikale / thorakale Trachea nicht rekonstruiert werden kann
- Resektion und Anastomose von Segmenten
- Zervikale Trachea, die nicht rekonstruiert werden kann

Fünf Ausführungen sind erhältlich

Pädiatrischer Safe-T-Tubus™

Standard Safe-T-Tubus™

Thorakaler Safe-T-Tubus™


Extralanger Safe-T-Tubus™

Tapered Safe-T-Tubus™



Montgomery®

Safe-T-Tubus™

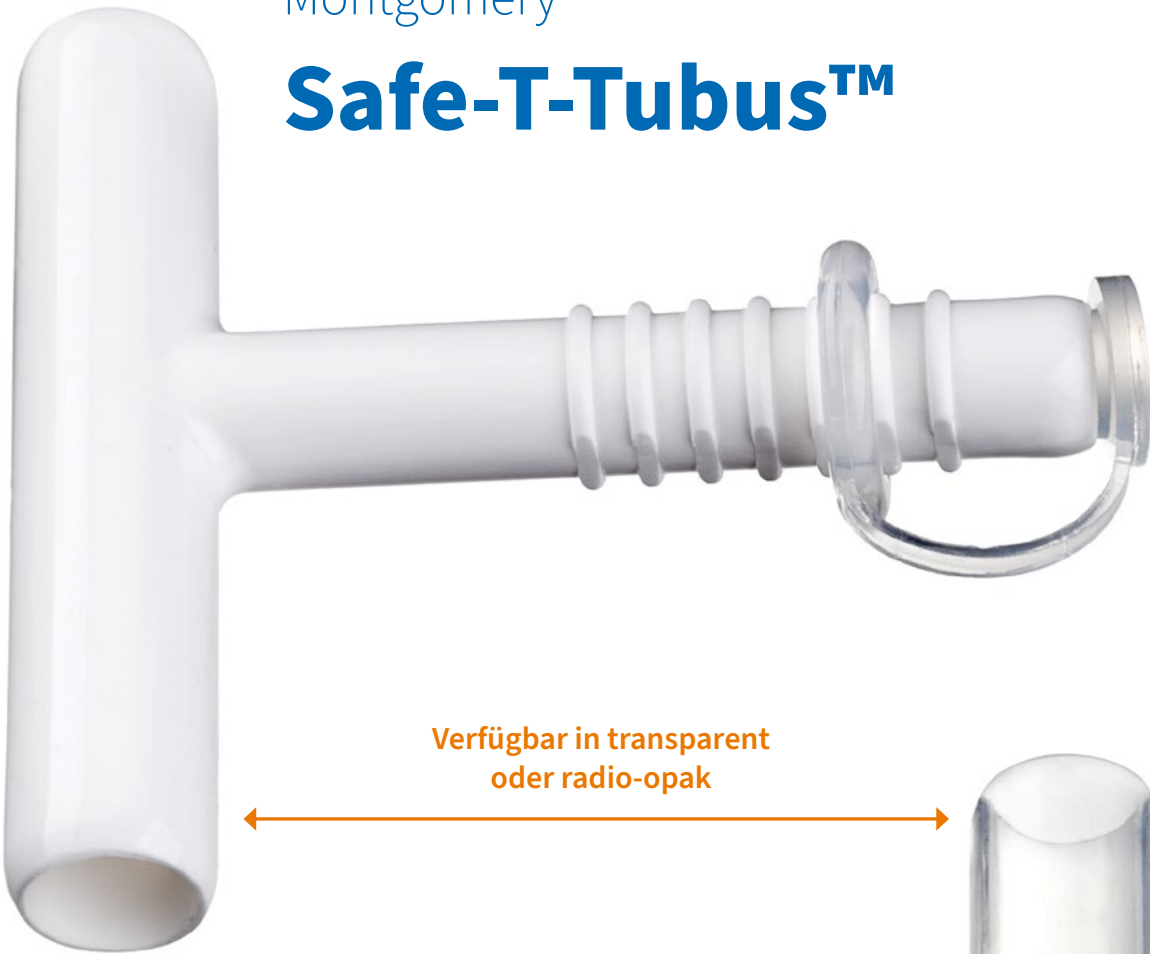

Verfügbar in transparent
oder radio-opak




Besondere Situationen erfordern gekürzte Safe-T-Tubus™ Schenkel.

Wir bieten einen Service zum Kürzen des Safe-T-Tubus nach Ihren Vorgaben. Die Enden werden abgeschrägt.



Bitte sprechen Sie uns an!

implantierbares Silikon,
antiadhärente Oberfläche

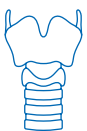

Vorteile des Originals



Montgomery® Sprechventil

Rillen


entlang des extraluminalen Schenkels ermöglichen die Anbringung eines Sicherungsrings, was das Risiko der posterioren Dislokation signifikant verringert.



Passende Sprechventile ermöglichen das Sprechen.



Der Safe-T-Tubus™ ist einfach zu platzieren, abzusaugen und zu entfernen, und kann unter Anästhesie verwendet werden.

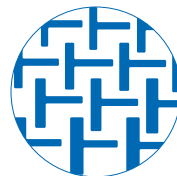

Der Safe-T-Tubus™ ist in einer umfangreichen Auswahl an Größen erhältlich.

Jeder Safe-T-Tubus™ wird steril geliefert.

Mit jedem Safe-T-Tubus™ werden 2 Ring-Stöpsel-Kombinationen geliefert. Weitere Ring-Stöpsel-Kombinationen sind separat erhältlich.



Montgomery®


Safe-T-Tubus™

Erhältlich in fünf Ausführungen



Pädiatrisch

Der **Pädiatrische Safe-T-Tubus™** verfügt über einen abgewinkelten extraluminale Schenkel, um das Absaugen und die Pflege der Luftwege zu erleichtern.

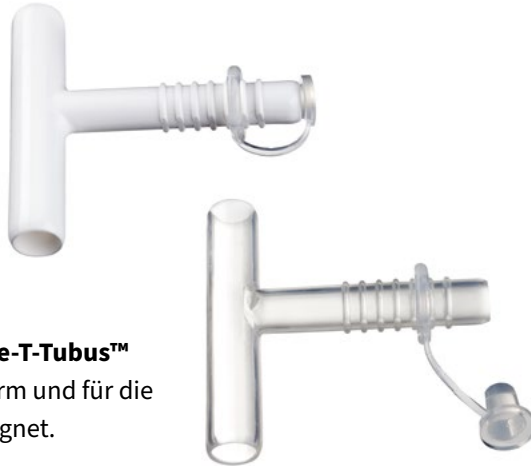


Standard

Der **Standard Safe-T-Tubus™** ist die Original-Form und für die meisten Fälle geeignet.



Thorakal

Der **Thorakale Safe-T-Tubus™** verfügt über einen extralangen unteren Schenkel für thorakale Anwendungen.

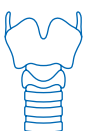




Extralang

Der **Extralange Safe-T-Tubus™** wurde entwickelt, um dem Chirurgen die völlige Freiheit zu geben, die intraluminalen Glieder auf jede gewünschte Länge anzupassen.

Tapered

Der **Tapered Safe-T-Tubus™** wurde entwickelt, um die Behandlung von trachealen, subglottischen, und glottischen Stenosen zu unterstützen.

Das obere Ende passt sich der Kontur der Glottis und Subglottis an, während der größere, untere Teil gleichzeitig als Stent für die Trachea dient. Das verjüngte Ende ist so konzipiert, dass es über die eigentlichen Stimmbänder hinaus bis auf die Höhe des Kehlkopfventrikels ragt.

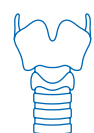


Safe-T-Tubus™

Bestellhinweise

Pädiatrisch - Serie 3200 Pädiatrischer Safe-T-Tubus™

Größe	REF		Abmessungen (mm)						REF
	Transparent	Radio-opak	A	B	C	D	E	F	Ring-Stöpsel-Kombination
6	BMP 320006	BMP 32006R	6	94	46	42	45	6	BMP 321066
7	BMP 320007	BMP 32007R	7	95	46	43	45	6	BMP 321066
8	BMP 320008	BMP 32008R	8	96	46	42	45	8	BMP 321086
9	BMP 320009	BMP 32009R	9	97	46	43	45	8	BMP 321086


Wird steril geliefert. Packung enthält 1 Tubus, 2 Ring-Stöpsel-Kombinationen.
Separat erworbenes Zubehör (321xxx) wird unsteril geliefert.

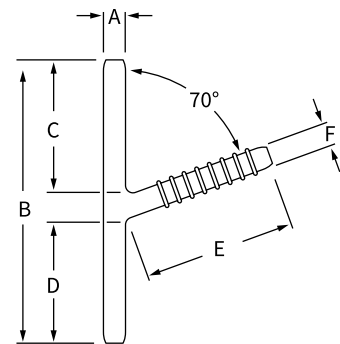

Standard - Serie 4200 Standard Safe-T-Tubus™

Größe	REF		Abmessungen (mm)						REF	
	Transparent	Radio-opak	A	B	C	D	E	F	Ring-Stöpsel-Kombination	15 mm Innen-Adapter
10	BMP 420010	BMP 42010R	10	50	19	23	39	8	BMP 321106	BMP 321107
11	BMP 420011	BMP 42011R	11	60	20	29	52	11	BMP 321126	BMP 321127
12	BMP 420012	BMP 42012R	12	65	23	32	50	11	BMP 321126	BMP 321127
13	BMP 420013	BMP 42013R	13	69	24	34	55	11	BMP 321126	BMP 321127
14	BMP 420014	BMP 42014R	14	71	25	35	59	11	BMP 321126	BMP 321127
15	BMP 420015	BMP 42015R	15	73	26	36	56	11	BMP 321126	BMP 321127
16	BMP 420016	BMP 42016R	16	75	27	37	65	11	BMP 321126	BMP 321127


Wird steril geliefert. Packung enthält 1 Tubus, 2 Ring-Stöpsel-Kombinationen.
Separat erworbenes Zubehör (321xxx) wird unsteril geliefert.

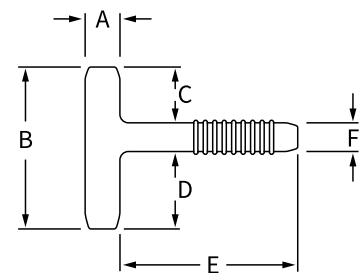

Thorakal - Serie 5200 Thorakaler Safe-T-Tubus™

Größe	REF		Abmessungen (mm)						REF	
	Transparent	Radio-opak	A	B	C	D	E	F	Ring-Stöpsel-Kombination	15 mm Innen-Adapter
10	BMP 520010	BMP 52010R	10	113	31	74	38	8	BMP 321106	BMP 321107
11	BMP 520011	BMP 52011R	11	115	30	74	50	11	BMP 321126	BMP 321127
12	BMP 520012	BMP 52012R	12	112	29	72	50	11	BMP 321126	BMP 321127
13	BMP 520013	BMP 52013R	13	116	31	74	55	11	BMP 321126	BMP 321127
14	BMP 520014	BMP 52014R	14	118	32	75	58	11	BMP 321126	BMP 321127
15	BMP 520015	BMP 52015R	15	119	33	75	56	11	BMP 321126	BMP 321127
16	BMP 520016	BMP 52016R	16	119	33	75	65	11	BMP 321126	BMP 321127


Wird steril geliefert. Packung enthält 1 Tubus, 2 Ring-Stöpsel-Kombinationen.
Separat erworbenes Zubehör (321xxx) wird unsteril geliefert.

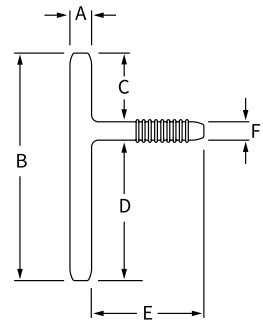

Extra-lang - Serie 6200 Extra-langer Safe-T-Tubus™

Größe	REF		Abmessungen (mm)						REF	
	Transparent	Radio-opak	A	B	C	D	E	F	Ring-Stöpsel-Kombination	15 mm Innen-Adapter
10	BMP 620010	BMP 62010R	10	161	76	76	39	8	BMP 321106	BMP 321107
11	BMP 620011	BMP 62011R	11	162	76	76	52	11	BMP 321126	BMP 321127
12	BMP 620012	BMP 62012R	12	162	76	76	48	11	BMP 321126	BMP 321127
13	BMP 620013	BMP 62013R	13	163	76	76	57	11	BMP 321126	BMP 321127
14	BMP 620014	BMP 62014R	14	163	76	76	59	11	BMP 321126	BMP 321127
15	BMP 620015	BMP 62015R	15	163	76	76	58	11	BMP 321126	BMP 321127
16	BMP 620016	BMP 62016R	16	163	76	76	65	11	BMP 321126	BMP 321127


Wird steril geliefert. Packung enthält 1 Tubus, 2 Ring-Stöpsel-Kombinationen.
Separat erworbenes Zubehör (321xxx) wird unsteril geliefert.

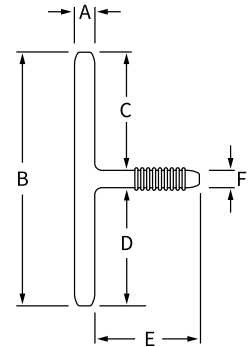

Tapered - Serie 7200 Tapered Safe-T-Tubus™


Größe	REF		Abmessungen (mm)							REF	
	Transparent	Radio-opak	A	B	C	D	E	F	G	Ring-Stöpsel-Kombination	15 mm Innen-Adapter
8/10	BMP 721008	BMP 71008R	8	163	77	78	69	8	10	BMP 321106	BMP 321107
10/13	BMP 721310	BMP 71310R	10	163	76	76	72	11	13	BMP 321126	BMP 321127

Wird steril geliefert. Packung enthält 1 Tubus, 2 Ring-Stöpsel-Kombinationen.
Separat erworbenes Zubehör (321xxx) wird unsteril geliefert.

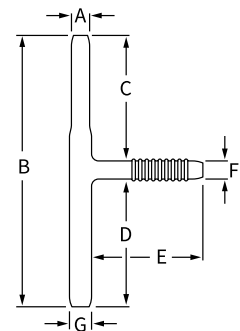


Montgomery®

Larynx-Produkte

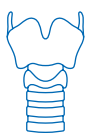

Larynx-Stent



Zur Prävention und Behandlung laryngealer Stenosen, wenn die glottische Stenose die mittlere oder hintere Glottis bzw. Supraglottis oder Subglottis einzeln oder in Kombination betrifft.

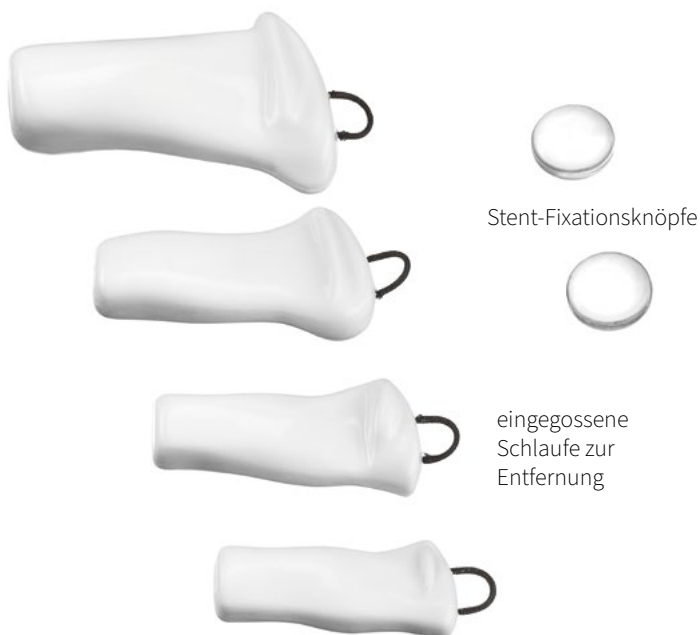

- Angepasst an die normale endolaryngeale Oberfläche
- Fest genug, um den Endolarynx postoperativ zu stützen, und dennoch weich und flexibel genug, um einen dem Endolarynx angepassten Sitz zu gewährleisten und die Gefahr von Verletzungen der Schleimhaut zu minimieren.
- Kann zur Schienung intralaryngealer Haut- oder Schleimhauttransplantaten auf freigelegten Bereichen des Larynx verwendet werden.
- Radio-opakes, implantierbares ("unrestricted") Silikon mit einer anti-adhärenenten, glatten Oberfläche und einer fest eingegossenen Schlaufe zur Entfernung.

Größe	REF	Abmessungen (mm)		
		A	B	C
Pädiatrisch	BMP 323010	33	10	9
Klein	BMP 323020	37	11	10
Mittel	BMP 323025	40	12	10
Groß	BMP 323030	47	15	16

Wird steril geliefert. Packung enthält 2 Stent-Fixationsknöpfe. Zusätzliche Stent-Fixationsknöpfe sind unsteril erhältlich (REF: BMP 323011).

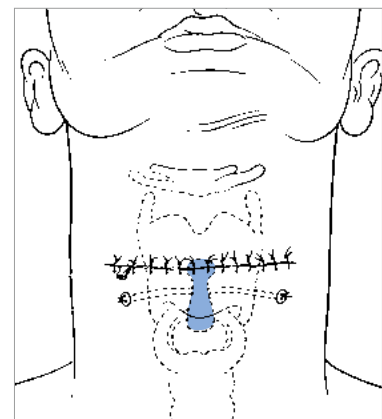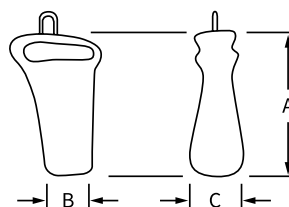

Rutter Suprastomaler Stent

Stent-System aus radio-opakem, implantierbarem (“unrestricted”) Silikon mit einer antiadhärenten, glatten Oberfläche zur Vorbeugung und Behandlung von laryngealen und trachealen Stenosen.

Der Stentkörper hat zwei abgeschrägte Enden. Das abgeschrägte Ende mit dem kleineren Innendurchmesser liegt distal am Tracheostoma und kann dieses sogar leicht überlappen. Das proximale Ende kann bis zur gewünschten Stentlänge abgeschnitten werden. Auf das proximale Ende des Stents wird abhängig von der Indikation einer der Stopfen aufgebracht.

10
Größen
verfügbar




Stopfen mit Öffnung für begrenzten Luftdurchfluss und ggf. Stimmbildung

Stopfen ohne Loch bei Patienten mit hohem Aspirationsrisiko

REF	Größe	Abmessungen (mm)	
		A	B
BMP 840006	6	6	83
BMP 840007	7	7	83
BMP 840008	8	8	88
BMP 840009	9	9	93
BMP 840010	10	10	93
BMP 840011	11	11	100
BMP 840012	12	12	126
BMP 840013	13	13	133
BMP 840014	14	14	140
BMP 840015	15	15	147

Wird steril geliefert. Packung enthält 1 Stent.

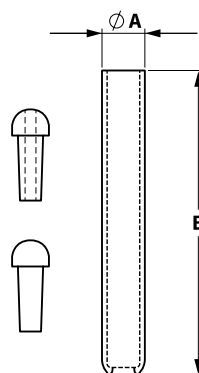

Larynx-Keel

- Weiches, implantierbares (“unrestricted”) Silikon
- antiadhärente, glatte Oberfläche
- In drei Größen radio-opak, auf Wunsch auch transparent erhältlich





Zur Behandlung anteriorer subglottischer Stenosen, mit oder ohne Stimmlippenlähmung

Der Larynx-Keel kann nach Beseitigung einer Stenose eingesetzt werden. In Fällen, in denen vorher ein Montgomery® Larynx-Stent eingesetzt wurde, dient der Keel nach Entfernen des Larynx-Stents zur Bildung einer scharfen anterioren Kommissur.

Weiterhin findet der Keel Anwendung nach Hemilaryngektomie


zur Vorbeugung von Stenosen. Der extralaryngeale Teil, der mit einer Achter-Naht an die Laminae thyrohyoidea befestigt wird, bedeckt die Thyreotomie-Reparatur mit seinem Schirm.

Durch die feste Fixierung des Keels wird eine Stenose und das Einwandern von Granulationsgewebe in den Larynx verhindert.

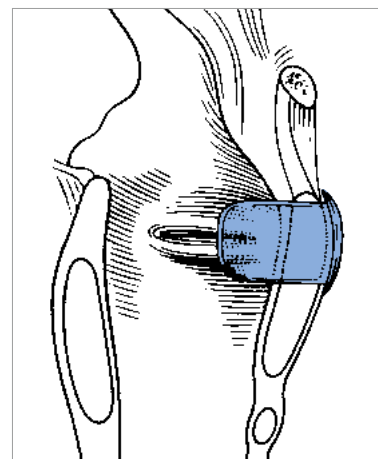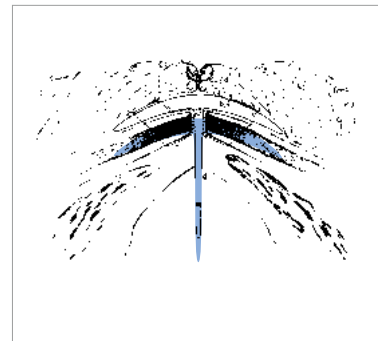

Size	REF		Abmessungen (mm)
	Transparent	Radio-opak	
12	BMP 323040	BMP 323040R	12
14	BMP 323050	BMP 323050R	14
16	BMP 323060	BMP 323060R	16

Wird steril geliefert. Packung enthält 1 Keel.

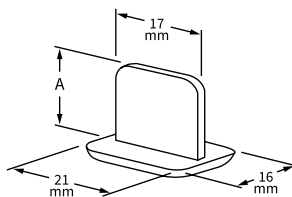

LACS

Laryngeal Anterior Commissure Stent

Der LACS (Laryngeal Anterior Commissure Stent) ist ein Silikon-Stent zur Behandlung und zur Prophylaxe von Glottis-Synechien (anteriore Glottis-Stenosen). Der Stent wird endoskopisch in die Commissura anterior laryngis eingesetzt und vermindert so den Kontakt der Stimmlippen während der postoperativen Phase.

Eigenschaften


- Implantierbares (“unrestricted”) Silikon
- Antiadhärente, glatte Oberfläche
- Individuell zuschneidbar für optimalen Sitz

Der LACS kann intraoperativ für einen optimalen Sitz zugeschnitten werden und verfügt über eine schlauchförmige Öffnung, in die ein nicht resorbierbarer Monofilament Faden der Stärke 0 (bzw. 3,5 M) werkseitig bereits eingefädelt ist.

Ein Silikonknopf zum Schutz der Haut beim Vernähen ist im Lieferumfang enthalten.

REF	Abmessungen (mm)		
	A	B	Dicke
BMP 323070	50	40	0,4

Wird steril geliefert. Packung enthält 1 LACS mit nicht resorbierbarem Monofilament Faden und 1 Silikonknopf.

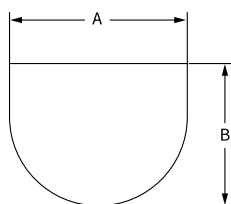

Fixierung

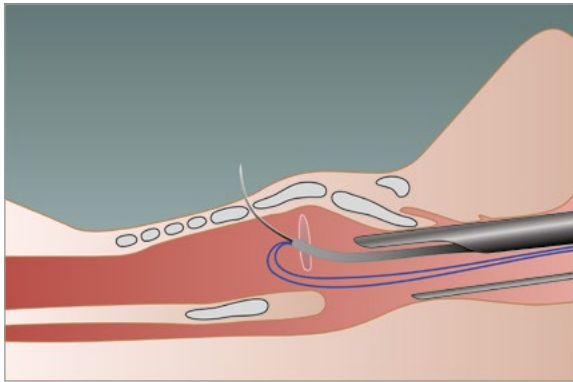


Abb.. 1

1. Faden des LACS am unteren Einstich aus dem Endolarynx heraus durch das Ligamentum cricothyroideum und durch die Haut nach außen führen.

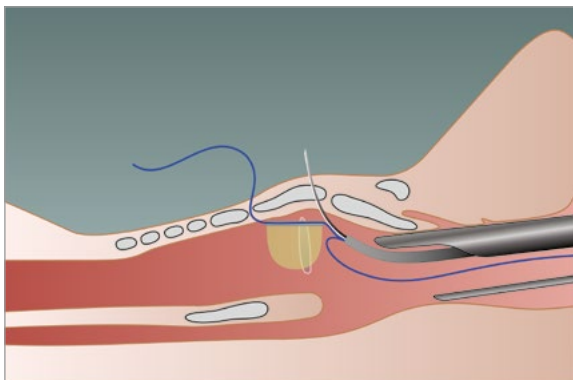


Abb.. 2

2. Faden des LACS am oberen Einstich oberhalb der anterioren Kommissur durch die Haut nach außen führen.

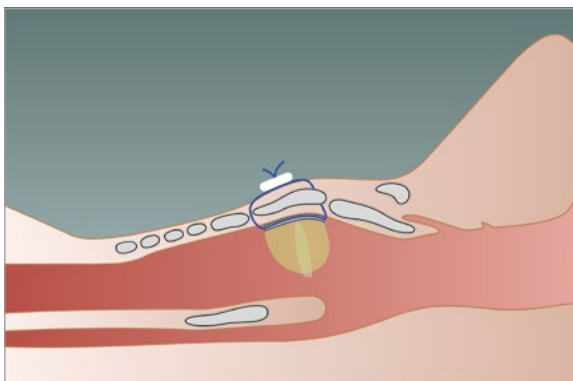


Abb.. 3


3. Faden auf Hautniveau durch den Nahtknopf führen und verknoten.



Montgomery®

Ösophagus-Tuben

- Implantierbares (“unrestricted”) Silikon
- Antiadhärente, glatte Oberfläche
- Radio-opak, auf ausdrücklichen Wunsch auch transparent erhältlich

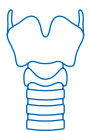

Montgomery®

Speichel-Bypass-Tubus

Zur stentvermittelten Reparatur bei zervikalen ösophagealen und hypopharyngealen Strikturen oder zur Erleichterung der Behandlung von Fisteln verschiedener Ursachen wie chirurgische Eingriffe, Bestrahlung, erhöhte Malignität, Traumata und Verätzungen.

Der dauernde Kontakt des durch Operation, Infektion oder Strahlentherapie verletzten Gewebes mit dem Speichel ist der Hauptgrund, der den Heilungsprozess und den Fistelverschluss behindert.

Der Montgomery® Speichel-Bypass-Tubus lenkt den Speichel in den distalen Ösophagus und erleichtert einen Spontanverschluss der Fistel oder eine für Reparaturmaßnahmen ausreichende Erholung des Gewebes.


Eine Ernährungssonde kann durch den Speichel-Bypass-Tubus eingeführt werden. Drohende Fisteln und Strikturen können durch die Sondeneinlage allein oder nach einer Bougierdilatation verhindert werden.

7
Größen
verfügbar



Größe	REF	Abmessungen (mm)		
	Radio-opak	A	B	C
8	BMP 322080R	33	191	8
10	BMP 322100R	35	191	10
12	BMP 322120R	37	191	12
14	BMP 322140R	39	191	14
16	BMP 322160R	41	191	16
18	BMP 322180R	43	191	18
20	BMP 322200R	45	191	20

Wird steril geliefert. Packung enthält 1 Tubus.

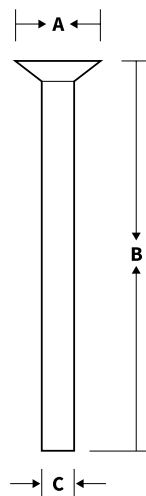


Har-El Pharynx Speichel-Bypass-Tubus

Zur Vereinfachung der Behandlung von Ösophagus-Fisteln verschiedenen Ursprungs wie z.B. chirurgische Eingriffe, Bestrahlung, fortgeschrittene maligne Krebserkrankungen, Traumata und die Aufnahme ätzender Substanzen.




- Zur Behandlung von orokutanen und pharyngokutanen Fisteln nach onkologischen Resektionen im Kopf- und Halsbereich
- Platzierung bei Patienten mit einer bestehenden Fistel vor rekonstruktiven Verfahren
- Prophylaktische Platzierung bei Patienten, bei denen ein hohes Risiko für die Entwicklung einer Fistel besteht.

Das proximale Ende weist eine trichterförmige Vertiefung auf, die zur Verankerung der Vorrichtung in Höhe des Zungengrundes dient.

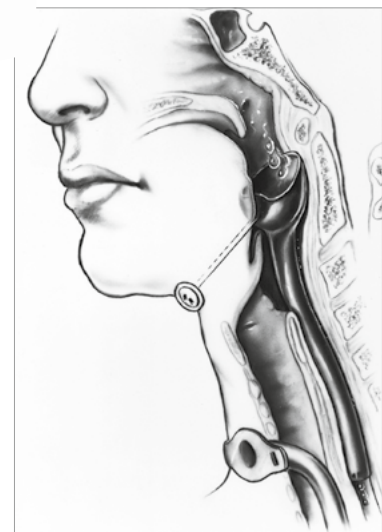

REF	
Transparent	Radio-opak
BMP 355120	BMP 355120R
Wird steril geliefert. Packung enthält 1 Tubus.	

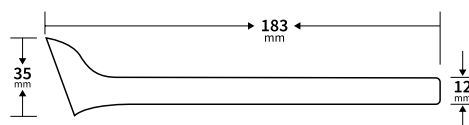


Trachealkanülen und Sprechventile

Montgomery®

Langzeitkanüle

zur Aufrechterhaltung des Luftwegs und als Ersatz für eine herkömmliche Trachealkanüle


- Kann zugeschnitten werden
- Ringscheibe für sicheren Sitz

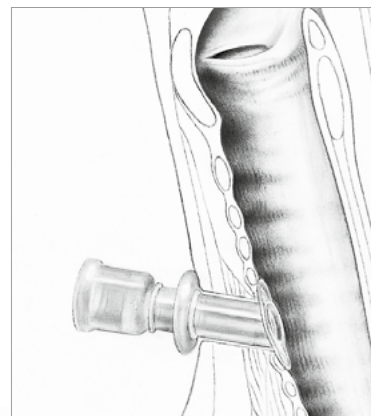


27° abgewinkelter Flansch, um sicherzustellen, dass der Tubus waagrecht in der Trachea sitzt – nichts ragt in die Trachea hinein.

Die Doppelnut entlang der Rohrachse befindet sich in der „6-Uhr-Position“ und dient zur Orientierung und als Abflussöffnung.

Hochpolierte Oberfläche, die das Wachstum des Epithels zwischen der Luftröhre und der Haut ermöglicht und fördert.

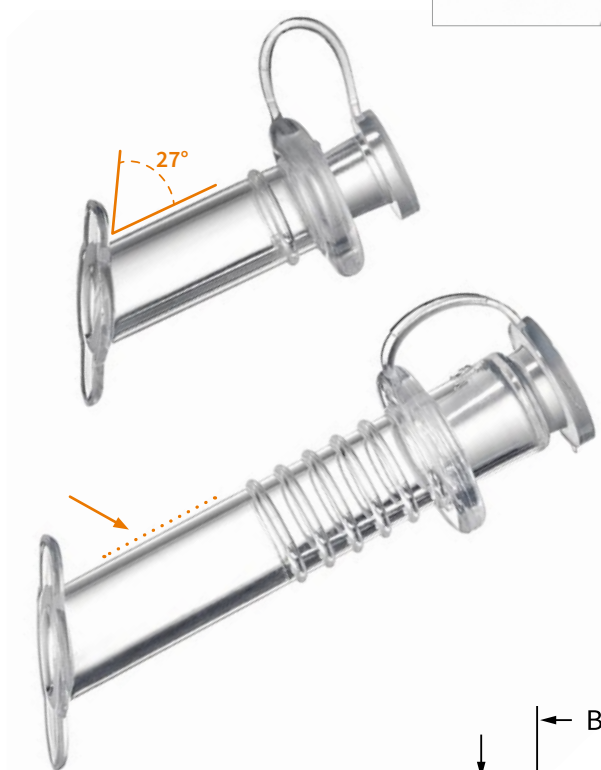

24
Größen
verfügbar

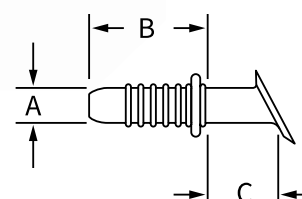

Größe	Maße (mm)		REF für folgende Stoma-Länge (Maß "C") in mm						REF	
	A	B	17-25	25-33	33-41	41-49	49-57	57-65	Ring-Stöpsel-Kombination	15 mm Innen-Adapter
4	9	37	BMP 330425	BMP 330433	BMP 330441	BMP 330449	BMP 330457	BMP 330465	BMP 310406	BMP 310404
6	11	37	BMP 330625	BMP 330633	BMP 330641	BMP 330649	BMP 330657	BMP 330665	BMP 310606	BMP 310604
8	12	37	BMP 330825	BMP 330833	BMP 330841	BMP 330849	BMP 330857	BMP 330865	BMP 310806	BMP 310804
10	13	37	BMP 331025	BMP 331033	BMP 331041	BMP 331049	BMP 331057	BMP 331065	BMP 311006	BMP 311004

Steril, für den einmaligen Gebrauch am Patienten. 1 Kanüle, 2 Ring-Stöpsel-Kombination, 1 IFU pro Packung.
Separat erhältliches Zubehör (31xxxx) wird unsteril geliefert.





Montgomery®

Sprechventil

Silikon-Sprechventil für fingerfreies Sprechen.

Mit dünner Silikon-Scharniermembran, die sich beim Einatmen öffnet und beim Ausatmen schließt.

Mit Hustenablassfunktion, die eine Verschiebung des Ventils oder Schlauchs nach Husten oder übermäßigem Druck in den Atemwegen verhindert.

- Einfach zu bedienen und robust
- Geringer Widerstand beim Einatmen
- Exklusive Hustenlöser-Funktion
- 4 Größen

Größe	REF
	Sprechventil, Silikon
4	BMP 350401
6	BMP 350601
8	BMP 350801
10	BMP 351001


Wird unsteril geliefert. Für den einmaligen Gebrauch am Patienten. 1 Sprechventil, 1 Aufbewahrungsbehälter pro Packung.



Moore Trachealkanüle

Aufrechterhaltung eines adäquaten Atemwegs bei gleichzeitiger Schienung der stenotischen zervikalen und thorakalen Trachea.

- Vier Komponenten: Silikon-Trachealkanüle mit Obturator und zwei Innenkanülen
- Flexibel, um sich der individuellen Anatomie anzupassen und gleichzeitig den Komfort des Patienten zu gewährleisten
- Hergestellt aus röntgendichtem Silikon zur Verringerung von Verkrustungen und Gerinnseln
- Standardlänge kann für individuelle Anwendungen gekürzt werden
- Zusätzliche Innenkanülen erhältlich als Ersatz

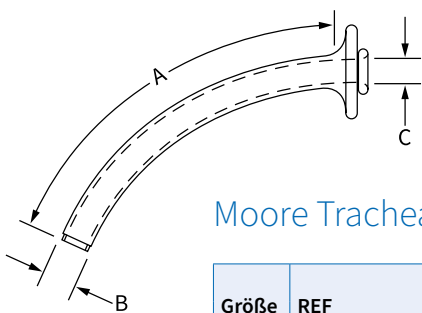

Moore Trachealkanüle

Größe	REF	Maße (mm)		
		A	B	C
6	BMP MTT-006	109	11	6,5
8	BMP MTT-008	109	12	7,5
10	BMP MTT-010	109	13	8,5


Wird steril geliefert. Beinhaltet Außenkanüle, Obturator, einfache Innenkanülen und Innenkanüle mit 15-mm-Adapter.

Ersatz-Innenkanülen

Größe	REF	Beschreibung
6	BMP MTT-006-CN	Innenkanüle mit 15-mm-Adapter
	BMP MTT-006-LP	einfache Innenkanüle
8	BMP MTT-008-CN	Innenkanüle mit 15-mm-Adapter
	BMP MTT-008-LP	einfache Innenkanüle
10	BMP MTT-010-CN	Innenkanüle mit 15-mm-Adapter
	BMP MTT-010-LP	einfache Innenkanüle

Wird steril geliefert. 2 Kanülen pro Packung (1 Kanüle pro Beutel, 2 Beutel pro Packung).



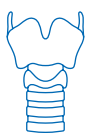

Die Produkte in diesem Katalog sind $\zeta\epsilon$ -gekennzeichnet.



Boston Medical Products, Inc. — Shrewsbury, MA, USA




Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisungen für unsere Produkte; ausschließlich diese sind maßgeblich. Der Abdruck von Hinweisen zur Anwendung der Produkte in diesem Katalog dient lediglich der Verständlichkeit und gibt den Stand der Drucklegung wieder. Fordern Sie im Bedarfsfall eine aktuelle Version an!




Die Gebrauchsanweisungen für einige unserer Produkte werden nur noch in elektronischer Form (als pdf-Datei) auf unserer Internetseite bereitgestellt. Die erforderlichen Zugangsdaten finden Sie auf dem Produktetikett.

Bitte beachten Sie, dass die Produktverfügbarkeit je nach Land variieren kann. Bitte kontaktieren Sie uns für Details.

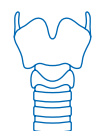

**Produkte für die
Larynx-Chirurgie**

einschließlich original
Montgomery® Produkte

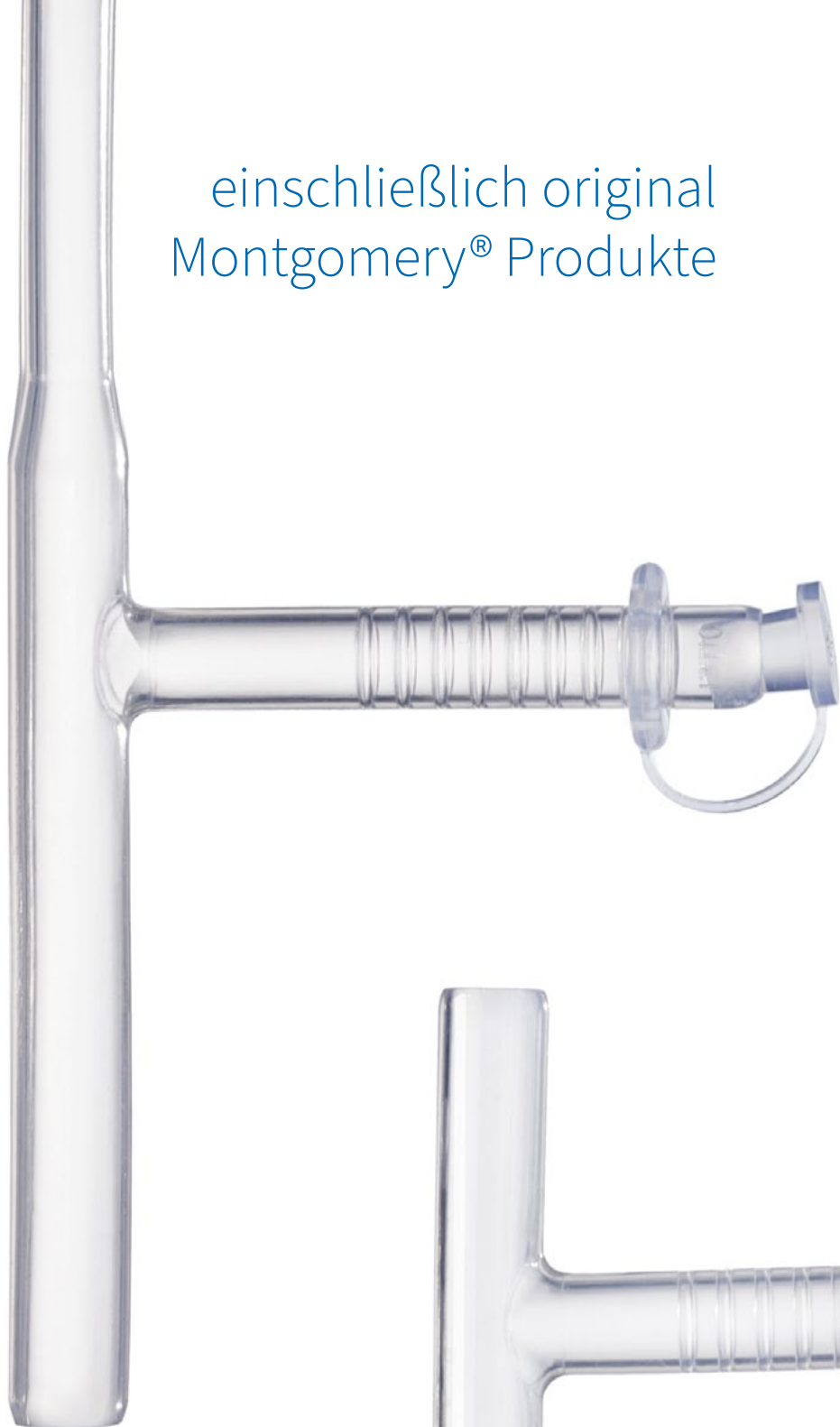

bess medizintechnik gmbh

Deutschland: Gustav-Krone-Str. 7 • D-14167 Berlin
Tel.: 030 / 816 909-0 • Fax: 030 / 816 909-16

Österreich: Kaiser-Josef-Platz 41 • A-4601 Wels
Tel.: 07248 / 66 1 44 • Fax: 07248 / 62205

www.bess.eu • office@bess.eu

